


Bandage du poignet Futuro™

NIVEAU DE SUPPORT : MODÉRÉ

Le bandage du poignet Futuro™ assure un support et la protection du poignet en limitant son mouvement, tandis que les deux sangles réglables permettent un soutien et une compression confortables.

INDICATIONS : Douleurs chroniques et quotidiennes du poignet

- ▶ Entorses
- ▶ Microtraumatismes chroniques

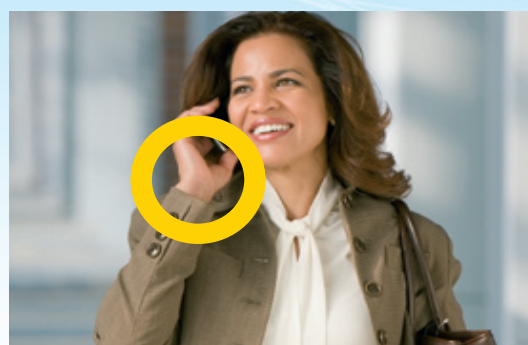

Caractéristiques spécifiques

Deux sangles pour un soutien et une compression sur mesure.
Coussinet en mousse optimisant la stabilisation.

Autres caractéristiques et avantages

- ▶ Mouvement limité et protection du poignet
- ▶ Port discret sous les vêtements
- ▶ Simple à enfiler et à retirer
- ▶ Pour main droite ou gauche



Mode d'emploi



Ouvrir les sangles. Positionner le coussinet vers la paume de la main. Envelopper et fixer la sangle principale.



Envelopper et fixer la sangle secondaire. Serrer jusqu'à obtenir un soutien suffisant.

Tailles et informations de commande (mesurer la taille comme illustré).



| Dimensions | Taille | N° d'article | Code Pharmacie BE | EAN |
|----------------|----------|--------------|-------------------|---------------|
| 14,0 – 24,0 cm | Réglable | 46709"DAB" | CNK 2251-593 | 4046719423309 |

Matériau :

71 % nylon, 21 % élastodiène, 3 % polyester, 3 % coton.
Contient du latex de caoutchouc naturel.

Instructions de nettoyage pour les bandages FUTUROTM

Lavage à la main jusqu'à 30 °C



L'utilisation d'eau de javel, le séchage en séchoir, le repassage et le nettoyage à sec sont à proscrire

